










Checkliste

Infektionsschutzanzug anlegen -Ausschleusung-

Allgemeiner Hinweis: Schmuck sollte vor dem Anlegen des Schutzanzuges abgelegt werden!

	Schritt 1 Hände desinfizieren	Hinweis: Gemäß EN 1500 Hygienische Händedesinfektion
	Schritt 2 Einmalhandschuhe anziehen	Hinweis: Erstes und unteres Paar
	Schritt 3 Atemschutzmaske anlegen	Hinweis: <ul style="list-style-type: none">• Mindestanforderung FFP 2• Maske vollständig entfalten• Nasenbügel anpassen
	Schritt 4 Schutzbrille anlegen	Hinweis: Brillenträger sollten das rundumschließendes Modell tragen



	<p>Schritt 5 Schutzanzug anlegen</p>	<p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beschädigung des Anzugs vermeiden• Reißverschluss komplett schließen• Falls vorhanden Klebestreifen nutzen• Beinbündchen über den oberen Teil des Schutzschuhwerks stülpen
	<p>Schritt 6 Einmalhandschuhe anziehen</p>	<p>Hinweis:</p> <p>2. Paar Einmalhandschuhe über den Infektionsschutzanzug ziehen</p>
	<p>Schritt 7 Kontrolle</p>	<p>Hinweis:</p> <p>Auf richtigen Sitz sowie auf dichten Verschluss überprüfen</p>